

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ONE GLOSS

GUMICE ZA OBRADU I POLIRANJE

One Gloss polireri koriste se za završnu obradu svih vrsta kompozitnih ispuna i poliranje kompozita, gleđi i uklanjanja viška cementa. Kod završnog poliranja menja se pritisak One Gloss polirera.

Indikacije:

1. Završna obrada i poliranje kompozitnih restauracija
2. Uklanjanje površinskih pigmentacija bez oštećenja zubne gleđi
3. Uklanjanje zaostalog viška cementa i poliranje gleđi nakon uklanjanja zubnog kamenca
4. Poliranje gleđi nakon skaliranja
5. Uklanjanje fleka sa zuba

Upustva za upotrebu

- **Poliranje kompozita**
 1. Primeniti veliki pritisak za završnu obradu.
 2. Primeniti lagani pritisak za poliranje.
 - **Uklanjanje zaostalog cementa**
 1. Primeniti umeren do lagani pritisak za ukljanjanje cementa i poliranje zubne gleđi
 - **Poliranje gleđi i uklanjanje fleka sa zuba**
 1. Za poliranje gleđi i uklanjanje fleka sa zuba koristiti lagani pritisak.

NAPOMENA: U potpunosti zavrnuti One Gloss mandrelu na One Gloss gumicu. Povremeno koristiti vodeni mlaz kada se primenjuje veći pritisak ili kod poliranja gleđi.

Informacije za naručivanje:

One Gloss set PN 0180

	Oblik	Preporučene regije za poliranje	PN
1	Cup	Incizalno, okluzalno	0181
2	Midi	Okluzalno, labijalno, lingvalno, bukalno	0182
3	IC	Labijalno, lingvalno, bukalno, interdentalno	0183
4	One Gloss Mandrels CA		0435

One Gloss

Preporučeni broj obrtaja
3.000-10.000

Maksimalan broj obrtaja
15.000

Preporučeni pritisak
0.3N- za poliranje
1.0N- za obradu

Pažnja:

- Ne prelaziti maksimalni dozvoljeni broj obrtaja instrumenta.
- Instrument potpuno zategnuti.
- Proveriti sigurnost instrumenta pre upotrebe stavljanjem u probni rad.
- Raditi samo sa preporučenim pritiskom.
- Ne koristiti pod oštrim uglom.
- Nositi zaštitne naočare pri upotrebi.
- Koristiti instrumente u samo navedene svrhe.