

BEAUTI BOND

Svetlosno polimerizujući, samojetkajući, jednokomponentni bond

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UPUTSTVO ZA STOMATOLOSKO OSOBLJE I PACIJENTE

- u slučaju alergijske reakcije lekara ili pacijenta, odmah prekinuti upotrebu i potražiti savet lekara;
- ne koristiti proizvod kod pacijenata osetljivih na methacrylat i aceton;
- osoblje alergično na methacrylat i aceton ne treba da koristi ovaj proizvod;
- ovaj proizvod je namenjen za upotrebu isključivo u ordinaciji;
- koristiti u dobro provetrenim prostorijama da bi se izbegla inhalacija acetona;
- ako proizvod dodje u kontakt sa tkivima usne duplje može stvoriti mrlju, u svakom slučaju će se ona izgubiti za nekoliko dana;
- koristiti zaštitne rukavice i naočare da bi se izbegla senzacija na ovaj proizvod, ako do kontakta dodje, mesto očistiti kuglicom vate natopljene u alkoholu i obilno isprati vodom;
- u slučaju kontakta s očima dobro isprati i potražiti savet lekara. Medicinske zaštitne rukavice su zaštita od ovog materijala, ali neki monomeri prodiru kroz njih. U slučaju takvog kontakta, skinuti rukavice i dobro isprati vodom;
- izbegavati kontakt sa odelom, u slučaju kontakta smesta mesto kontakta natopiti kuglicom vate natopljene alkoholom;

UPOTREBA

Bond za stomatološke kompozitne restauracije i oštećenja zuba uključujući dentin.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- očistiti površine zuba uobičajenim postupkom;
- preparirati kavitet uobičajenim postupkom;
- zakostiti koferdamom polje rada uobičajeno;
- zaštititi pulpu Calcium hidroksid preparatom na mestima tankog dentina;
- aplikacija Beauti Bond-a: Bocica-Otvoriti bocicu i namočiti četkicu, posle zatvoriti bocicu. Namazati površine kaviteta koristeći četkice. Pojedinačne doze; otvoriti pakovanje i pomoću četkice namazati površine zuba;
- ostaviti da odstoji 10 sekunda, izduvati pusterom 3 sekunde da se bond ravnomerno nanese na površine;
- prosvetliti površinu zuba –Halogeno svetlo(400-500 nm)10 sekundi, Led svetlo(440-490nm)5 sekundi;
- aplikovati kompozit, prosvetliti, obraditi ispun;

NAZNAKE U UPOTREBI

- ovaj proizvod se čuva na sobnoj temperaturi pre upotrebe;
- zatvoriti bocicu neposredno nakon upotrebe i koristiti prema uputstvu za pacijenta;
- Mikro Fine cetkice su namenjene za jednokratnu upotrebu;
- zaštititi od izvora toplote jer je proizvod zapaljiv;
- čuvati se vatre u prostorijama gde se proizvod upotrebljava;
- zaštititi pulpu u slučaju dubokih kaviteta(ne koristiti preparate na bazi eugenola) ;
- ne koristiti ovaj proizvod u kombinaciji sa drugim adhezivima;
- koristiti zaštitne rukavice i ne gledati direktno u svetlosni izvor;
- koristiti sisaljku da bi se sprečilo mešanje preparata sa pljuvackom;
- ne koristiti u drugim okolnostima koje nisu propisane u Uputstvu za upotrebu;
- čuvati u frizideru(1-10:°C).Zaštititi od izvora svetlosti;
- ne koristiti proizvod u velikim količinama;
- koristiti pre isteka roka trajanja;

SASTAV

Beauti Bond-Bis-GMA,TEGDMA,Phosphoric acid monomer,Aceton,voda.

Pakovanje –Beauti Bond 6 ml,dodatak-Micro cetkice-1 drzac i 50 cetkica,25 posuda.

Pojedinacne doze-Beauti Bond 0,1 ml,dodatak 50 cetkica.