

## GLASIONOMER CEMENT CX-PLUS

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Glasionomer Cement CX plus je radiokontrastan glasionomer cement namenjen za cementiranje kruna, mostova, inleja i ortodonskih aparata, pouzdan u primeni.

Posebno važne osobine su – jednostavnost rukovanja, fina konzistencija, manja osetljivost na vlagu i prolongirano radno vreme u primeni. Oslobadja fluoride.

1. Prah/tečnost omer: Jedna merica praha sa dve kapi tečnosti daje omer praha 2,0 g praha-1,0 g tečnosti.
2. Priprema: zelenu SHOFU kašičicu ubaciti u bočicu sa prahom i napuniti je tako da je poravnamo, koristeći dršku špatule za mešanje.
3. Preparacija: očistiti kavitet pastom bez ulja. Isprati vodom, prosušiti. Ako je pulpa eksponirana potpuno ili delimično, prekriti pre cementiranja preparatom na bazi kalcijum hidroksida. Očistiti u ultrazvučnom kupatilu površine koje se cementiraju - krunica, mostova, , isprati vodom, očistiti alkoholom i prosušiti.
4. Priprema / vreme pripreme: mešati špatulom na staklenoj površini pri sobnoj temperaturi (21-25°C), pri vlažnosti 50+/-10%. Mešati prah i tečnost zajedno dok se homogenizuju plastičnom kratkom špatulom. Potpuno vreme mešanja je 30 sekundi.
5. Aplikacija: koristeći špatulu unesite tanak sloj cementa na unutrašnje površine kruna. Ne prepunjavajte cementom. Naneti na površine zuba i ukloniti višak kuglicom vate. Potrebno je zaštititi cementiranu površinu od prodora vlage.
6. Radno vreme i vreme aplikacije: vreme mešanja je 3,5 min. od početka mešanja. Radno vreme je 4 min. od početka kraja mešanja.
7. Skladištenje: obzirom da je cement neznatno higroskopan, zatvoriti bočicu sa prahom i tečnošću posle upotrebe. Čuvati oboje na hladnom mestu i ne izlagati izvoru svetlosti i toplote.

#### UPOZORENJE

Izbegavati kontakt praha i tečnosti sa očima. U slučaju kontakta, isprati obilno vodom i potražiti savet lekara.

SPECIJALNO FORMULISANO ZA UPOTREBU U STOMATOLOGIJI  
NE KORISTITI PO ISTEKU ROKA TRAJANJA

Generalni zastupnik i distributer:

 MIKODENTAL

S. Novaković 19, 15000 Šabac

Tel/fax: 015 345 123

[www.mikodental.rs](http://www.mikodental.rs)